



dermenergy **OXY**  
*Advanced Oxygen Skin Treatment*

---

L'evoluzione del trattamento  
con  
**Ossigeno**  
Concentrato/Iperbarico


---

dermenergy   
SWITZERLAND

# dermenergy OXY

*Advanced Oxygen Skin Treatment*

---

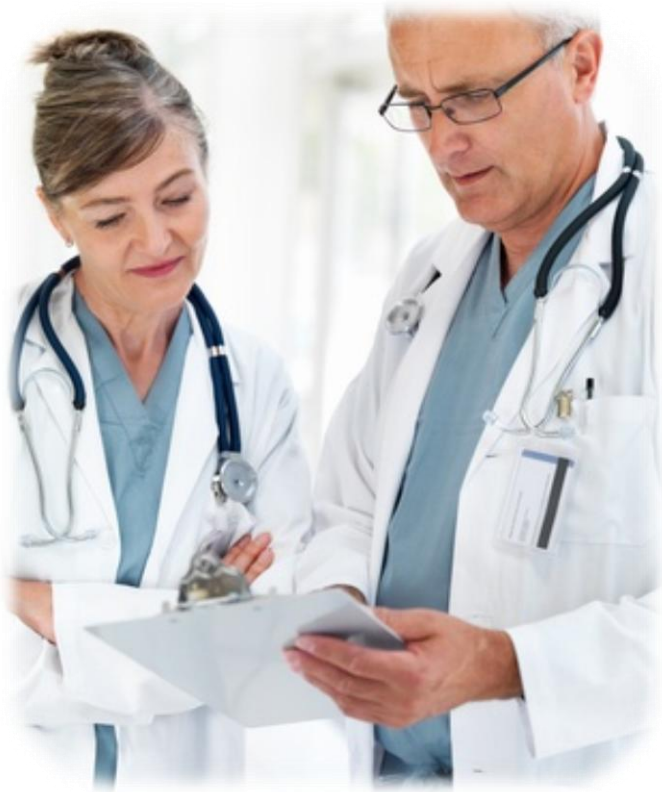

L'evoluzione vincente  
nel trattamento con

**Ossigeno Concentrato**

per

**Anti-aging**

e

**Problematiche Cutanee**

---

dermenergy   
SWITZERLAND

# Ossigeno concentrato – Sieri specifici – Soft skin needling

Concentratore  
OxyPro



Serums Complex

MicroRoll



# Il Sistema dermenergy OXY

## Metodica OXY & Roll

Il metodo e i prodotti dermenergy sono frutto della più avanzata ricerca e tecnologia Svizzera e costituiscono una evoluzione concreta del trattamento con Ossigeno Concentrato. Il trattamento consiste nella veicolazione in profondità nell'epidermide delle molecole di ossigeno e di sieri complessi, appositamente studiati e ad alta concentrazione di principi attivi nanostrutturati.



Il trattamento può essere eseguito anche con l'**ausilio di MicroRoll ME-20**, uno strumento per skin needling che permette di superare la barriera dello strato corneo della pelle attraverso la creazione indolora e non invasiva di micro-canali, con conseguente incremento della veicolazione (fino a 5 volte superiore) dei principi attivi, favorendo anche il microcircolo cutaneo.

Sfruttando quindi l'ossigeno, presidio naturale, i cui effetti biologici sui tessuti sono ben noti, si ottengono concreti risultati anti-aging ed anche su alcune patologie cutanee in modo efficace, indolore e non invasivo.

# Il concentratore OxyPro

dermenergy  
SWITZERLAND 



Il concentratore di ossigeno di **nuova generazione** OxyPro unisce elevate prestazioni, semplicità di utilizzo, maneggevolezza, trasportabilità e affidabilità. La straordinaria silenziosità, la struttura, le dimensioni contenute ed il gradevole design, ne fanno uno strumento facile da gestire, estremamente efficace ed adattabile alle diverse esigenze del professionista. Utilizzando l'aria dell'ambiente, il sistema produce ossigeno ad altissima concentrazione (sino al 97%), che è poi erogato mediante due distinte uscite indipendenti, utilizzabili anche contemporaneamente. Il concentratore di ossigeno OxyPro **non richiede consumi** o operazioni di manutenzione particolari: è sufficiente una semplice pulizia periodica del filtro per garantire il migliore funzionamento.

Alloggiamento  
per manipoli  
Ossigenazione Profonda  
e Perfusione



OxyPro è dotato di 4 manipoli per  
**Ossigenazione Profonda.**

Grazie al loro diverso diametro, permettono di ossigenare comodamente ed efficacemente le varie parti da trattare.

Il **manipolo per perfusione**, semplice e maneggevole, permette di veicolare in profondità i sieri specifici.

# Caratteristiche Tecniche

Display digitale con timer impostazione tempo lavoro e timer contavita



Regolazione flusso Ossigeno



Maniglione posteriore per facilitare lo spostamento del concentratore



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Peso** Kg. 28

**Larghezza** cm. 28,50

**Profondità** cm. 54,50

**Altezza** cm. 71,20

**Temp. ambiente durante l'operatività** 5° ~ 40°

**Umidità ambiente durante l'operatività** ≤ 80%

**Press. atmosferica ambiente** 12,47psi-15,37psi

**Purezza ossigeno max** 97%

**Flusso Ossigeno** 1 - 5 Lt/min.

**Pressione max erogatore ossigenazione** 50 kpa

**Pressione erogatore perfusione** 200 kpa

**Rumorosità** < 40 db

**CE 0123 - EEC 2007/47 - 93/42**

**Voltaggio di alimentazione** 50 Hz - 220V

**Potenza assorbita in ingresso** 400 W

**Classificazione elettrica** II Tipo B

**OXYPro**  
dermenergy   
SWITZERLAND

# I Sieri Complex

dermenergy  
SWITZERLAND 

Lift Serum Complex    Fill Serum Complex



Sieri straordinariamente efficaci dalle caratteristiche superiori: la qualità dei principi attivi, la loro elevata concentrazione, i test batteriologici scrupolosi ed accurati e la tecnologia avanzata di produzione fanno dei sieri dermenergy un prodotto di altissimo livello, in grado di fornire **risultati eccellenti in combinazione con il trattamento con Ossigeno e/o Skin Needling.**

I sieri specifici dermenergy si avvalgono della **più avanzata tecnologia ed esperienza svizzere**, con una particolare attenzione e cura alla qualità ed alla salute e sicurezza. Sono studiati e strutturati per essere assorbiti con facilità e veicolati negli strati profondi della pelle. Non contengono conservanti chimici (NO PARABENI).

Lift Serum Complex e Fill Serum Complex sono **sieri dalle eccezionali proprietà anti-aging, con marcata azione biorivitalizzante e rigenerante.** La loro formulazione è caratterizzata da **acido ialuronico nanostrutturato** ad altissima concentrazione, **complessi di peptidi** e di vitamine, aminoacidi, principi antiossidanti ed idratanti, enzimi, flavonoidi, estratti fitoterapici, sali minerali e conservanti naturali. **Lift Serum Complex** ha una maggiore concentrazione di complessi peptidici, quindi un più marcato effetto lifting naturale, **Fill Serum Complex** con maggiore concentrazione di acido ialuronico nanostrutturato, ha una più intensa azione ridensificante ed idratante.

# Caratteristiche Serum Complex

## Lift Serum Complex



Grazie ai complessi di peptidi presenti in alta concentrazione, dona un marcato effetto lifting, ridisegna l'ovale del volto e interviene efficacemente sulle lassità cutanee. Efficace anche nella riduzione di rughe e linee sottili.

Acido ialuronico nanostrutturato, aminoacidi, complessi vitaminici, enzimi, principi antiossidanti ed idratanti, flavonoidi, estratti fitoterapici e sali minerali rendono la pelle turgida, voluminosa, compatta, profondamente idratata, elastica, tonica e luminosa, contrastando la formazione dei radicali liberi.

Agisce con un effetto tensore, donando un effetto lifting naturale e duraturo.

Potente rivitalizzante ed antiossidante.

## Fill Serum Complex



E' straordinariamente efficace nella riduzione delle rughe e delle linee sottili e nel rendere turgide e volumizzate le zone trattate. Grazie alle spiccate proprietà idratanti e riempitive dell'acido ialuronico nanostrutturato, presente in altissima

concentrazione, sono evidenti, fin dalla prima applicazione, una attenuazione delle rughe e delle linee sottili. La pelle sarà turgida, compatta, elastica, tonica, luminosa e idratata. La presenza di acido ialuronico Nano-strutturato in altissima concentrazione, complessi di peptidi e vitaminici, coenzima Q10, aminoacidi, principi antiossidanti e idratanti, flavonoidi, estratti fitoterapici, enzimi, sali minerali e conservanti naturali, garantisce un risultato immediato.

dermenergy   
SWITZERLAND


**PARABEN FREE – PARFUME FREE – NO ANIMAL TESTING**

# MicroRoll – Soft Skin Needling

Lo strato corneo costituisce una vera barriera di protezione difficilmente penetrabile, che impedisce o riduce la veicolazione in profondità nella pelle anche di creme e cosmetici.

Il **Soft Skin Needling** con **MicroRoll ME-20/ME-50**, attraverso i suoi micro-ago, permette di **superare la barriera protettiva** dello strato corneo, creando una moltitudine di micro-canali, attraverso i quali i principi viene favorito l'incremento della penetrazione di attivi di prodotti topici, come sieri e creme anti-età e rivitalizzanti.

Con l'utilizzo di MicroRoll ME-20/ME-50 si ottiene così un **incremento di assorbimento** dei principi attivi negli strati più profondi della pelle fino a **5 volte superiore**.

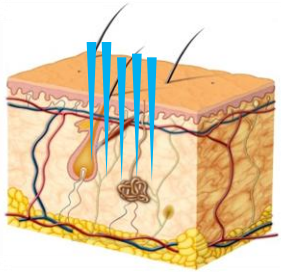

Inoltre, l'applicazione del MicroRoll ME-20/ME-50 accelera il rinnovamento cellulare ed il ripristino del naturale spessore dell'epidermide. Grazie alla sua **delicata azione esfoliante**, dona luminosità alla pelle spenta e opaca e aumenta la circolazione sanguigna nella zona trattata, con conseguente **riattivazione del microcircolo**.

**L'azione dei micro-ago non è ablativa ma esfoliante**, mantenendo la pelle intatta e favorendo la rimozione dello strato corneo superficiale, causa principale del colorito opaco e spento della pelle. Lo skin needling con MicroRoll ME-20 è **indolore**, poiché la profondità di penetrazione dei micro-ago, di lunghezza di appena 0,2 mm, è minima, solo fino agli strati superficiali dell'epidermide: **non raggiunge i nervi sensoriali**, e quindi non causa dolore, né provoca sanguinamento. Può causare un lieve rossore, che scompare dopo poche ore.

# dermenergy OXY Risultati

## ANTI-AGING

- Riduce visibilmente rughe e linee sottili
- Ossigena in profondità la cute, donandole un aspetto luminoso e sano
- Effetto lifting naturale senza compromettere la naturale mimica facciale
- Ridisegna i contorni del viso, riducendo lassità cutanee
- Rende la pelle turgida, voluminosa, compatta, elastica, idratata e luminosa
- Riattiva il microcircolo ed il metabolismo cellulare
- Efficace contro pori dilatati
- Stimola la produzione di fibrina e collagene

---

## APPLICAZIONI CLINICHE/TERAPEUTICHE

L'Ossigeno Concentrato è un ottimo coadiuvante nel trattamento di alcune problematiche cutanee:

- Acne
- Piaghe, lesioni, ulcere,
- Infiammazioni e ferite, anche post-operatorie



dermenergy   
SWITZERLAND

# Sistema dermenergy OXY Plus



Concentratore OxyPro



Manipoli  
Ossigenazione Profonda  
e  
Perfusione

MicroRoll ME-20



dermenergy  
Serum Complex



Standardo autoportante  
da cm. 200 x cm. 80

- 1 Concentratore OxyPro con accessori
- 4 Manipoli per Ossigenazione Profonda varie dimensioni
- 1 Manipolo perfusione ugello diametro mm. 0,3 – capacità serbatoio cc. 7
  
- 12 MicroRoll ME-20
- 12 dermenergy Lift Serum Complex da ml. 20 cad.
- 12 dermenergy Fill Serum Complex da ml. 20 cad.
  
- 1 Standardo autoportante promozionale da cm. 200 x cm. 80
- 500 Flyers promozionali, informativi sul trattamento, pieghevoli a 2 ante
- Manuale d'uso e manutenzione – Certificazioni CE / TUV – Garanzia 24 mesi
- Manuale Protocolli e Metodica

dermenergy   
SWITZERLAND

dermenergy  
SWITZERLAND 

**CRM**  
Medical  
Medical and Aesthetics solutions

---

**CRM Medical s.r.l.** – Via Campania, 7 – 05100 – Terni – Italy  
Ph. +39.0744.305056 – [info@crmmedical.it](mailto:info@crmmedical.it) [www.crmmedical.it](http://www.crmmedical.it)